

Geachte vogelliefhebber,

Dank u voor uw interesse in de DNA-Vogelgeslachtsbepalingstest van BirdCare Portal.

Het verheugt mij dat u gebruik wilt maken van de Early Gender® geslachtsbepalendetest.

Graag wil ik u wijzen op onze ruime ervaring in het doen van geslachtsbepalingen bij vogels. BirdCare Portal is het eerste bedrijf in Nederland dat u een product biedt dat qua prijs en kwaliteit ver boven de overige laboratoria ligt. Het concept van BirdCare Portal is, u betaald alleen voor dat wat u nodig heeft.

Onze prijs is de voordeligste van Europa, wij kunnen u deze prijs aanbieden omdat BirdCare Portal U niet meer laat betalen dan noodzakelijk is.

Voor een Early Gender® geslachtsbepalendetest hebben wij niet meer nodig dan enkele volgroeide. De veren hoeven geen bloed te bevatten.

Het resultaat van de Early Gender® geslachtsbepalendetest is met circa 12 werkdagen bekend en heeft een zekerheid van 99,9 % zekerheid. Het resultaat zal u via de e-mail worden medegedeeld.

Wanneer u gekozen heeft voor een geslachtsbepaling met certificaat krijgt u het certificaat via de reguliere post thuis gestuurd. Vergeet **niet** om de getuigenverklaring met de aanvraag mee terug te sturen, zonder getuigenverklaring kunnen we u **geen** certificaat uitreiken.

Mocht u onverhoopt nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,




Joop den Boer
BirdCare portal

Als u geen ervaring heeft in het vasthouden van vogels, dan raden wij u aan deze procedure van het verzamelen van veren te laten doen door iemand die daar wel ervaring in heeft, zonodig door een dierenarts. Dit voor de veiligheid van de vogel en van u.

Veren voor een Early Gender® DNA geslachtsbepalendetest moeten vers geplukt worden, er mogen geen veren gebruikt worden die uitgevallen (ruien) zijn. Het DNA-materiaal uit de veren bevindt zich aan in de schacht, het gedeelte wat het dichtst bij de huid zit. Het is belangrijk om de veren individueel en zo dicht mogelijk bij de huid vast te pakken. Gebruik hiervoor een pincet, speciaal bij kleinere vogels. Vermijd dat de veren tijdens het plukken aan het bovenste gedeelte worden vastgepakt. De veren kunnen op dit punt gemakkelijke breken, en zijn daardoor niet meer bruikbaar.

Zie illustratie.

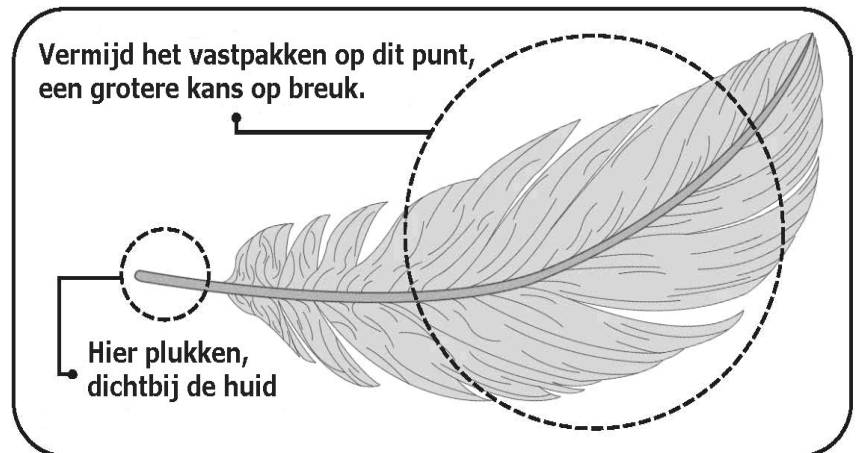

Voordat u begint met het plukken van de veren, maakt u de handen grondig schoon. Als u van meerdere vogels tegelijk een geslachtsbepaling wil laten doen, wast u de handen grondig tussen elke handeling van de verschillende vogels. Vermijd het aanraken van de uiteinde van de veren. Volg de stappen hieronder

1. Label elke envelope voordat u begint de verzamelprocedure van de veren, schrijf op elke envelope, hersluitbare plasticzak de naam van de aanvrager, vogelsoort en ringnummer.

2. Het plukken van de borstveren houd de vogel goed vast, pluk 4-5 borstveren. Donsveertjes of bebloede veren zijn niet nodig. Volgroeide veren van met name kleinere vogels kunnen gebruikt worden. Als u vragen heeft over het plukken, kunt u contact opnemen met telefoonnummer +31-107144872.

3. Plaats de veren in de gelabelde envelope of plasticzak Plaats de veren in de envelope of plastic zak die u eerder gelabeld heeft. Vermijd het aanraken van de uiteinde van de veren. Elke envelope of plasticzak mag slechts van één vogel veren bevatten. De envelope niet dicht likken.

4. Vul het formulier geslachtsbepaling voor vogels in

Vul het formulier Early Gender® vogelgeslachtsbepaling volledig in en verstuur het gefrankeerd in een gesloten envelope aan:

BirdCare Portal
Palet 19 3181 HL
Rozenburg

Aanvraag formulier

Klantnummer -----
Naam -----
Adres -----
Postcode ----- Plaats -----
Telefoonnr. -----
E-mail -----

	Vogelsoort	Ringnummer	Versneld	Certificaat
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

U kunt er voor kiezen om de uitslag versneld in huis te hebben, deze zal dan met **6 werkdagen** bekend zijn. De kosten van een versnelde procedure is 0,80 euro per vogel extra.

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer 59.91.67.211 t.n.v. Incertezza te Rozenburg onder vermelding van uw naam en/of klantnummer.

Op het moment dat uw betaling is bijgeschreven krijgt u via de e-mail een factuur en zal het onderzoek gestart worden.